

Myriad Matrix™

Myriad Matrix – Postoperative Pflegeanleitung

Diese Anleitung soll das Management von Wunden unterstützen, die mit **Myriad Matrix™** einer fortschrittlichen extrazellulären Matrix (EZM) zur Beschleunigung der Heilung, versorgt wurden.

Eine sachgerechte Wundpflege ist wichtig, um das Infektionsrisiko zu senken und die Heilungsraten zu verbessern. Diese Anleitung soll weder ärztliche Anweisungen noch Einrichtungsprotokolle oder das klinische Ermessen ersetzen.

Leitfaden für Deckverband




Die folgenden Wundverbände können zusammen mit Myriad Matrix-Produkten verwendet werden:

Primärverband – eine nicht haftende Petrolatum-Wundauflage – oder eine silikonbasierte Wundauflage kann in direktem Kontakt mit **Myriad Matrix**-Produkten platziert werden.

Sekundärverband – fixiert den Primärverband und sorgt für Schutz, Kompression und Exsudatmanagement.

Beispiele sind: NPWT | Schaumverband | Superabsorber

Je nach Wundlokalisation und Exsudatmenge sollte die Anwendung eines Hydrogels in Betracht gezogen werden, um einen angemessenen Feuchtigkeitsgehalt zu gewährleisten.

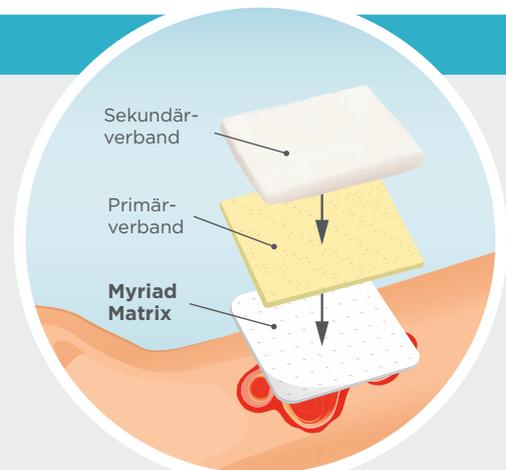

Wann sollte der Verband gewechselt werden?



Empfohlene Zeitpunkte für Verbandwechsel:

Es wird empfohlen, die Wunde am 2. bis 3. postoperativen Tag zu beurteilen. Der erste Verbandwechsel wird zwischen dem 5. und 7. Tag empfohlen.

Nach dem ersten Verbandwechsel alle 5 bis 7 Tage überprüfen.



Es sollte erwogen werden, den Primärverband während der ersten 10-14 Tage zu belassen, um eine Störung der Integrierung der **Myriad Matrix** Produkte zu minimieren.



Die Häufigkeit des Verbandwechsels wird durch mehrere Faktoren bestimmt:

- Verwendetes **Myriad Matrix** Produkt und platzierte **Myriad Matrix** Menge
- Größe und Tiefe des Weichgewebedefekts
- Exsudatmenge
- Vorschriften der Einrichtung und klinische Leitlinien

Leitfaden für Verbandwechsel



Den jeweiligen Primär- und Sekundärverband vorsichtig entfernen, um zu vermeiden, dass Myriad Matrix im Wundbett beschädigt wird.

Wenn Teile von **Myriad Matrix** am Primärverband anhaften, mit Kochsalzlösung befeuchten, um das anhaftende Material zu lösen.

Sobald der Sekundärverband entfernt ist, die gesamte Wunde auf Anzeichen einer Infektion beurteilen.

Wenn keine offensichtlichen Anzeichen einer Infektion bestehen, das Transplantat mit Kochsalzlösung oder Hydrogel rehydrieren und einen neuen Sekundärverband nach Anweisung des Arztes platzieren.

Beim Verbandwechsel zu erwarten



Erwartete Farbe und Geruch:

Nach der Platzierung beginnt die Integrierung von **Myriad Matrix** in der Wunde. Bei anschließenden Verbandwechseln ist **Myriad Matrix** als karamell- oder cremefarbener Rest erkennbar, während die Integrierung im Wundbett beginnt. Damit kann auch ein Geruch verbunden sein. Das ist normal und der Verband sollte nicht entfernt werden. Die Resorptions- und Integrierungszeit von **Myriad Matrix** können variieren.

Übermäßiges Debridement/Entfernen kann das neue Gewebe Übermäßiges beschädigen. Verbleibende Reste von **Myriad Matrix** tragen weiterhin zur Beschleunigung der Heilung bei.

Mögliches Aussehen der Wunde 1-7 Tage nach der Applikation



Mögliches Aussehen der Wunde 7-14 Tage nach der Applikation



Aufrechterhaltung einer idealen Transplantathydrierung und Feuchtigkeit der Wunde

Myriad Matrix muss feucht gehalten werden, um sicherzustellen, dass das Produkt weiterhin zur Beschleunigung der Heilung beiträgt. Ein wasserlösliches Hydrogel kann auf den Primärverband aufgetragen werden.

Wenn die Wunde trocken erscheint und **Myriad Matrix** hart geworden ist und eine gelbe/braune Farbe angenommen hat, mit Kochsalzlösung oder Hydrogel rehydrieren und ein erneutes Anwenden bei jedem Wechsel des Deckverbands in Erwägung ziehen.

Nach richtiger Hydrierung wird das Transplantat weiterhin in das Wundbett integriert werden. Es erscheint dann als karamell-/cremefarbener Rest, um den herum sich gesundes rotes/rosafarbenes Gewebe bildet.



Hydrierung erforderlich



Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

MICRO-MEDICAL Instrumente GmbH

MICRO-MEDICAL

Am Neumarkt 2-4

01968 Senftenberg / Deutschland

Tel: +49 (0) 3573 / 720 31 - 0

Fax: +49 (0) 3573 / 720 31 - 31

E-Mail: info@micromedical.de



AROA BIOSURGERY LTD

2 Kingsford Smith Place, Airport Oaks,
Auckland 2022, New Zealand

www.aroa.com

AROA™, Myriad Matrix™ und AROA ECM™ sind Marken von Aroa Biosurgery Limited.

MKT.1818.00-DE | ©November 2022